

iOP Dental Plaster



- 各種印象材との適合性が良く、滑沢な印象面の石膏模型が製作できます。
- 10kg(2.5kg×4袋入り)は、外箱上部に持ち手が付いており、スムーズに持ち運ぶことができます。

お徳用として20kg袋のラインナップもございます。



2.5kg×4袋の個包装。
収納容器に入れやすい
使い切りタイプです。

- カラーラインナップ：ホワイト
- 包装：10kg(2.5kg×4袋入り)
20kg袋

スピーディーな水馴染みと良好な練和性

ラバーボウルに、適量の水と本品を入れて練和します。



練和開始10秒後



練和開始20秒後

水馴染みが良いため、一見滑らかな面性状となりますが、練和不足の場合には物性の低下を引き起こす可能性があるため、手練和の場合は30～60秒間の確実な練和をしてください。

滑沢な模型面



印象材との適合性



石膏模型の製作、咬合器装着、義歯フラスコ埋没等、
様々な作業に適しております。

物理的性質 (仕様)

混水量	硬化時間	線硬化膨張	圧縮強さ
50%	15分	0.20%	17MPa

該当規格：JIS T 6600「歯科用石膏」 タイプ2 (クラス2)
一般医療機器 (クラスI) 歯科材料8 歯科用石膏及び石膏製品 JMDN70897010
一般的名称：歯科用普通石膏
届出番号：21B3X10010000018 (20kg袋)
13B3X00112000047 (2.5kg袋)